

ПОКАЗАНИЯ:

- Эстетические изменения кожи в период пре- и постменопаузы;
- Сухость кожи, гиперкератоз;
- Повышенная кожная чувствительность;
- Снижение тонуса, тургора и эластичности кожи, вызванные хроно- и фотостарением;
- Мимические и статические морщины, птоз тканей;
- Расширенные поры;
- Гиперпигментация, в том числе возрастная;
- Сниженный энергетический потенциал клеток и клеточный метаболизм;
- Снижение кожной микроциркуляции, ломкость сосудов;
- Купероз;
- Кожа курильщика.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КУРСЫ ПРОЦЕДУР:

- Базовый курс:
3-4 процедуры с интервалами 10-14 дней.
- Поддерживающий курс:
1 процедура 1 раз в месяц.

Техника введения в области лица, шеи, декольте и других зон:
папульная, бугорковая, 0.025 мл/вкол;

Расход препарата:

2 мл – область лица,
1 мл – область шеи,
1-2 мл – область декольте,
1 мл – кисти (0,5 мл на 1 кисть)

Игла: 30, 31, 32 G 4 - 6 мм

