

HONEYFILL

Long lasting HA Filler
Bio Plus Co., Ltd

Почему именно этот филлер?

HoneyFill обладает идеальными вязкоупругими и объемообразующими свойствами. Пластичен, не даёт отёка, снижен риск аллергических реакций.



В течение всего срока службы филлеры HoneyFill :

- находятся в области введения, не мигрируют
- остаются единым целым, не фрагментируются
- способны восстанавливать свою форму после любых механических воздействий



DVS & MCL

Благодаря новой технологии MCL с дивинилсульфоном (DVS) в качестве кросслинкера имеют гораздо более плотную ретикулярную структуру и, как следствие, более выраженный корректирующий эффект.

DVS не депонируется в жировой ткани, что обуславливает отсутствие отсроченных побочных явлений.

Глобулярная структура гиалуроновой кислоты делает ее устойчивой к действию эндогенной гиалуронидазы, вследствие чего наблюдается стойкий эффект коррекции.

HONEYFILL



	SOFT	MILD	HARD
Концентрация ГК	20 мг/мл	20 мг/мл	20 мг/мл
Молекулярный вес	2.4-4 млн. Da	2.4-4 млн. Da	2.4-4 млн. Da
Размер частиц	325 мкм	350 мкм	420 мкм
Кросс-линкер	DVS	DVS	DVS
Время действия	1 год	1 год	1 год
Рамзер игл	30G	27G/25G	27G/25G
Объем	1x1 мл	1x1 мл	1x1 мл
Срок годности	2,5 года	2,5 года	2,5 года
Зоны коррекции	• Периорбитальная зона • Мочки ушей • Периоральная зона • Межбровные морщины • Горизонтальные морщины лба • Височная область • Кисти рук	• Верхняя треть лица (мужчины) • Средняя треть лица (носощечная борозда) • Нижняя треть лица (подбородочная зона) • Коррекция контура и объема губ • Морщины марионетки	• Носогубные складки • Скуловая область • Подбородок и мандибулярный угол • Коррекция контура и объема губ

Результаты HoneyFill

42 года



- Коррекция средней трети - Mild, канюля 22G
- Коррекция губ - Mild, игла 27G
- Коррекция подбородка и мандибулярного угла - Hard, иглы 25G и канюля 22G

62 года

- Коррекция средней части лица - Mild, канюля 22G
- Коррекция возрастных губ - Mild, игла 27G
- Коррекция подбородка и восполнение свободного пространства подбородочной области - Hard, иглы 25G и канюля 22G





HONEYFILL

Производство

HoneyFill производится на заводе BioPlus Co., Ltd, который занимает ведущее место на южнокорейском рынке по производству препаратов для эстетической медицины.



Интрадермальные филлеры пролонгированного действия HoneyFill прошли все независимые клинические исследования, имеют сертификацию RU, CE, KFDA, GMP, ISO и патент личного бренда.