




Amalain Inconti

AMALAIN INCONTI – монофазный вязкоэластичный гель, полученный путем постадийного взаимодействия высокомолекулярной гиалуроновой кислоты эфиром BDDE, для глубоких подслизистых введений в области уретры. Гель содержит поперечно-сшитую гиалуроновую кислоту в концентрации 20 мг/мл.

AMALAIN INCONTI является биосовместимым и полностью биodeградируемым, не отторгается, не мигрирует, характеризуется отсутствием антигенной активности, апиногенностью, равномерным распространением в тканях и продолжительным терапевтическим эффектом.

Подвергаясь изоволеметрическому распаду в организме, сохраняет объем в процессе расщепления.


Время биодеградации 24-36 месяцев.

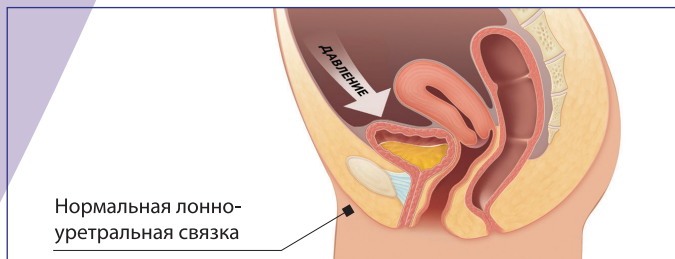

Техника введения болюсная, линейно-ретроградная или «веерная», в зависимости от области введения.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ


- ① Коррекция дефектов уретровезикального сегмента при стрессовой инконтиненции у женщин;
- ② Коррекция недержания мочи у мужчин, после радикальной простатэктомии или трансуретральной резекции предстательной железы;
- ③ Волюмизация при ретроградной эякуляции у мужчин;
- ④ Восполнение объема периуретральной зоны при рецидивирующем посткоитальном цистите у женщин;
- ⑤ Аугментация больших половых губ.

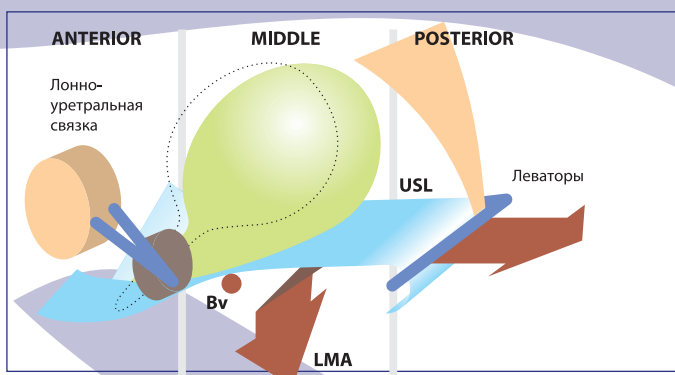

ТЕХНИКА ВВЕДЕНИЯ И ДОЗАЦИЯ

При стрессовой инконтиненции у женщин инъекции проводятся трансперинеально в миофасциальные слои периуретрально в 4-х точках 3, 9, 6, 12 часов в средней трети уретры. Пациентка находится в литотомической позиции. Также для визуализации уретры возможно введение катетера Фолея размером желательнее 20 Ch. В область средней трети уретры периуретрально в четырех точках 3, 6, 9, 12 часов на расстоянии приблизительно 2 см от наружного отверстия уретры (средняя треть уретры, измеряется предварительно) вводится Amalain Inconti в объеме по 1 мл в каждую точку с равномерным распределением. После выполнения процедуры уретральный катетер извлекается.

При недержании мочи у мужчин после радикальной простатэктомии или трансуретральной резекции предстательной железы и ретроградной эякуляции, введение Amalain Inconti осуществляется через цистоскоп и иглу для эндоскопических инъекций. После антисептической обработки в уретру вводится анестезирующий гель-лубрикант. Затем в уретру вводится цистоскоп с рабочим каналом. Во время проведения уретроскопии исключается наличие стриктур уретры. С помощью иглы для цистоскопических инъекций вводится Amalain Inconti в подслизистый слой уретры на расстоянии 1 – 1,5 см от шейки мочевого пузыря, проксимальнее семенного букорка. Глубина введения – 3 – 4 мм, позиция – 3, 6, 9 и 12 часов условного циферблата. Объем вводимого геля до 4 мл на одну процедуру.

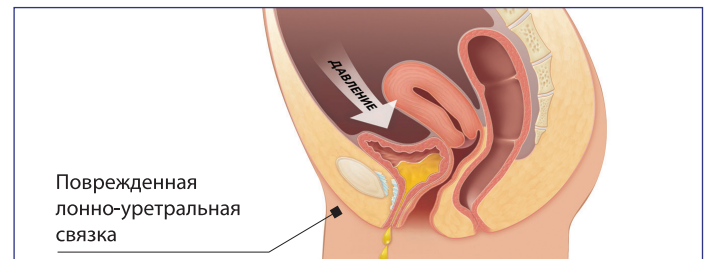

При коррекции посткоитального цистита, связанного с дистопией наружного отверстия уретры, препарат Amalain Inconti вводится периуретрально трансперинеально линейно-ретроградной или болюсной техникой под контролем зрения до коррекции гипермобильности и уменьшения зрения (до смыкания) наружного отверстия уретры. После процедуры возможно кратковременное затруднение мочеиспускания, связанное с отеком периуретральных тканей. При необходимости можно установить уретральный катетер на 24 часа. Дополнительная коррекция возможна спустя 3 недели.

Рекомендованный курс 1 раз в 24-36 месяцев, при необходимости возможно использование через меньший промежуток времени.

