



MEDICAL CASE

PLASMOACTIVE®

**АУТОПЛАЗМА В КЛИНИКЕ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА**

КОСМЕТОЛОГИЯ





В одной коробке находится
10 набор-пакетов
Plasmoactive® Plus
или **20** набор-пакетов
Plasmoactive® Standard

Состав наборов Medical Case (Plasmoactive®)

	В набор-пакет входит	Стандарт [20]	Плюс [10]
	Шприц 5 мл	1	2
	Катетер-бабочка с луер-адаптером	1	1
	Игла для мезотерапии 0,3×4	2	2
	Игла для мезотерапии 0,3×13	2	2
	Игла 21G×1½ (0,8×40 мм)	1	2
	Пробирка	1	2




Гепарин

- препятствует свертываемости крови
- инфузионный мелкодисперсионный гепарин

Сепарационный гель

- качественная адсорбция
- необходимая концентрация тромбоцитов
- четкий разделительный слой
- хорошая фиксация эритроцитов
- не влияет на состав аутологичной плазмы

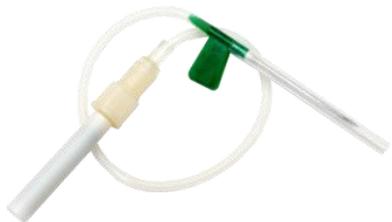

Катетер бабочка – предотвращает гемолиз, защищает врача от прямого контакта с кровью пациента.



Шприц с системой луер-лок предотвращает вероятность срыва иглы.



Иглы с лазерной заточкой позволяют практически исключить болевые ощущения от процедуры и значительно увеличить степень удовлетворенности пациенток.



Жидкая форма плазмы

Что это? Тромбоцитарная аутологичная плазма, содержащая факторы роста, витамины, ферменты, микроэлементы.

Для чего? Для снятия воспалений, усиления регенерации тканей и улучшения гемодинамики.



Фибриновая форма плазмы

Что это? Частично денатурированные белки плазмы, в частности фибрин.

Для чего? Для армирования кожи перед другими процедурами и самостоятельно.



Гелевая форма плазмы

Что это? Денатурированные белки, потерявшие устойчивую пространственную структуру.

Для чего? Для коррекции объемных нарушений тканей и стереомоложения лица.



Хроностарение



Пигментация



Сухая, чувствительная кожа



Акне



Постакне



Алопеция



Биоревитализация



Контурная
пластика



Мезотерапия



Химические пилинги,
дермабразия



Мезонити



Лазерная
терапия



Фототерапия



Пластические
операции

1 Подготовка пациента



2 Забор крови



3 Центрифугирование



4 Введение в ткани



Биологические эффекты:

Устранение воспаления

Усиление регенерации
(коллагенез, ангиогенез)

Улучшение
микроциркуляции и
метаболизма

Нормализация водного и
кислородного баланса

Повышение местного
иммунитета

Клинические эффекты:


Уменьшение и устранение
морщин, гиперпигментации,
признаков фото- и
хроностарения, отеков и
темных кругов под
глазами, постакне

Торможение процессов
старения

Приобретение кожей более
свежего и здорового вида

Улучшение тургора,
рельефа кожи

Улучшение внешнего вида
рубцов

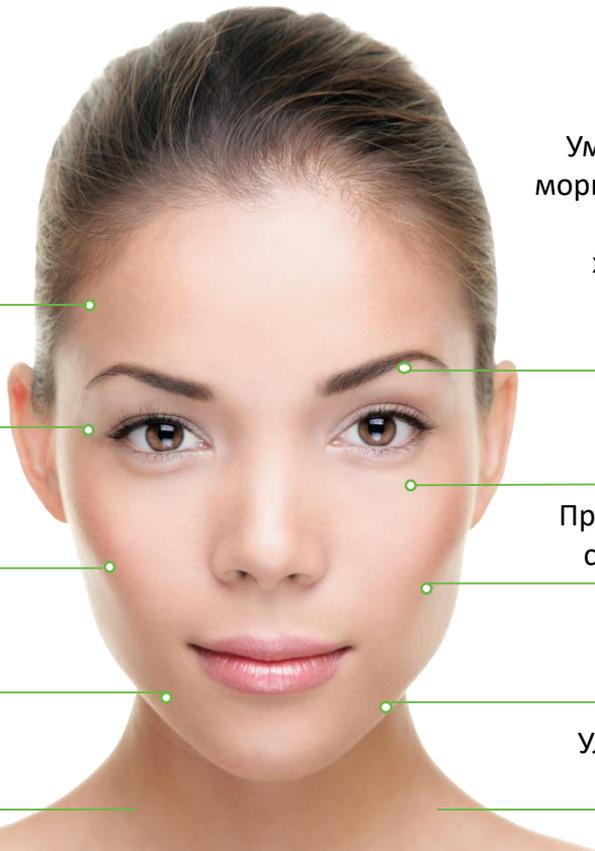

Наименование процедуры	Действия для проведения процедуры	Средства для проведения процедуры	Цена за ед. товара	Время	Кол-во расходных материалов в наборе	Стоимость материалов, входящих в процедуру	Стоимость процедуры
Аутостимуляция регенеративных процессов в области лица/шеи/зоны декольте	1. Забор крови из вены	Жгут	0,00р.	3 мин	1	0,00	869,00р.
		Спиртовая салфетка	1,00р.		2	2,00	
		Набор Medical Case (Plasmoactive®) Стандарт	430,00р.		2	860,00	
		Держатель пробирки	7,00р.		1	7,00	
	2. Центрифугирование	Центрифуга		5мин	-	-	
	3. Забор плазмы и обкалывание зоны, подлежащей лечению	Шприц с замком luer-lock 5,0 (входит в состав набора)	0,00р.	1 мин	2	0,00	
		Иглы 0,3x4 мм (входит в состав набора)	0,00р.	30-40мин	2	0,00р.	
		Иглы 0,3x13 мм (входит в состав набора)	0,00р.	-	2	0,00р.	
		Иглы 21 G 0,8x40 мм (входит в состав набора)	0,00р.	-	2	0,00р.	

Среднерыночная стоимость
процедуры:

Москва **5 000 – 8 000 руб.**

Регионы **3 000 – 5 000 руб.**

Курс прохождения

(определяется врачом, зависит от состояния кожи):

1-4 процедуры (с интервалом **7-10 дней**)

Наименование процедуры	Действия для проведения процедуры	Средства для проведения процедуры	Цена за ед. товара	Время	Кол-во	Стоимость материалов, входящих в процедуру	Стоимость процедуры
Гелевая форма плазмы	1. Забор крови из вены	Жгут	0,00р.	3 мин	1	0,00	919,00р.
		Спирт. салфетка	1,00р.		2	2,00	
		Набор Medical Case (Plasmoactive®) Стандарт	430,00р.		2	860,00	
		Держатель для пробирки	7,00р.		1	7,00	
	2. Центрифугирование	Центрифуга		5мин	-	-	
	3. Забор плазмы из пробирки	Шприц с замком luer-lock 5,0 (входит в состав набора)	0,00р.	1 мин	2	0,00	
	4. "Варка" плазмы	Термостат		6-8 мин	-	-	
	5. Для получения однородности геля	Кран трехходовой	50,00р.		1	50,00	
	6. Обкалывание зоны, подлежащей лечению	Иглы 0,3x4 мм (входит в состав набора)	0,00р		2	0,00р	
		Иглы 0,3x13 мм (входит в состав набора)	0,00р		2	0,00р	
Иглы 0,8x40 мм (входит в состав набора)		0,00р.	30-40 мин	2	0,00р.		

Среднерыночная стоимость
процедуры:

Москва **8 000 – 10 000 руб.**

регионы **5 000 – 8 000 руб.**

Рекомендации: перед курсом инъекций гелевой формы аутоплазмы
желательно пройти курс инъекций жидкой аутоплазмы (**2-4** процедуры)

Оборудование, необходимое для инъекций аутоплазмы,
ОКУПАЕТСЯ В ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ РАБОТЫ:

**Выручка****80 000 руб.**

(курс из 4 процедур
для 4 пациентов)

**Затраты**

1. Центрифуга 80-2
19 500 руб.



2. Расходные материалы
(на 16 процедур)
13 760 руб.

**Прибыль****46 740 руб.**

Эффективно

Безопасно

Работает как
самостоятельно, так и
в комплексе с
другими методами

Удлиняет фазу
ремиссии

Не требует
сложного
оборудования

Активация плазмы
в тканях
происходит в
течение 30 минут



MEDICAL CASE

PLASMOACTIVE®

Минимальное
вмешательство

Установлен противо-
воспалительный
эффект

Сертифицировано

Сокращает сроки
заживления

Низкая степень
болезненности

Уменьшает
частоту
осложнений



MEDICAL CASE

PLASMOACTIVE®

Ключ к управлению процессами регенерации



Читайте: medicalcase.ru



Звоните: **8 800 100 68 29; 8(843) 210-29-29**



Общайтесь: facebook.com/medicalcase25