

HYALUAL
— SCIENCE & RESULTS —

Редермализация

Доказанное улучшение качества кожи
за счет повышения ее регенераторного
потенциала



РЕДЕРМАЛИЗАЦИЯ

доказанное улучшение качества кожи за счет повышения ее регенераторного потенциала

В ОТЛИЧИИ ОТ ДРУГИХ ПРОЦЕДУР ОМОЛОЖЕНИЯ действие редермализации имеет сразу 3 направления:



Регуляция биохимических процессов в клетке



Восстановление водного баланса



Активная блокада свободных радикалов

Такой тройной эффект достигается за счет применения технологии Double Synergic Effect: максимально синергичный результат двух компонентов входящих в состав используемых препаратов – высокомолекулярной гиалуроновой кислоты и янтарной кислоты (в форме сукцината натрия). В этом и есть главное преимущество процедуры Редермализации.



БИОРЕВИТАЛИЗАНТ

Гиалуроновая кислота



РЕДЕРМАЛИЗАНТ

Высокомолекулярная гиалуроновая кислота + янтарная кислота

Гиалуроновая кислота

является **природным материалом**, содержащимся в нервных, соединительных и эпителиальных тканях

- Активирует противовоспалительные медиаторы
- Восстанавливает и поддерживает водный баланс
- Стимулирует синтез основных структурных белков
- Обеспечивает механическую поддержку тканей

Янтарная кислота

(сукцинат) – **внутриклеточный метаболит**, важнейший участник цикла Кребса, который содержится во всех органах и тканях

- Нормализует микроциркуляцию, активирует лимфоотток
- Нормализует клеточный энергообмен
- Обладает антиоксидантным свойством
- Препятствует повреждению клеточной мембраны
- Стимулирует синтез основных структурных белков

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ



РЕДЕРМАЛИЗАЦИЯ



Hyalual 1.1%



Hyalual 1.8%

Hyalual 2.2%



ПОСТПРОЦЕДУРНЫЙ УХОД В КАБИНЕТЕ



PROFI DELUX

Спрей для
поспроцедурного ухода
нанести в 3 слоя
150 ml



SAFE SUN

Солнцезащитное
средство
Spf 50
150 ml



НАЗНАЧЕНИЕ ДОМАШНЕГО ПОСТПРОЦЕДУРНОГО УХОДА



PROFI DELUX

Спрей для
поспроцедурного ухода
3 слоя каждые 3 часа, 3 дня
50 ml



SAFE SUN

Солнцезащитное средство
ежедневно утром, 5-7 дней
Spf 50
150 ml

РЕДЕРМАЛИЗАЦИЯ ПО МОРФОТИПАМ

ПРОЦЕДУРА I 2 недели

ПРОЦЕДУРА II 2 недели

ПРОЦЕДУРА III

	ПРОЦЕДУРА I 2 недели	ПРОЦЕДУРА II 2 недели	ПРОЦЕДУРА III
УСТАЛЫЙ	HYALUAL 1.1% Лимфодренаж, папулярная 	HYALUAL 1.1% или HYALUAL 1.8% Папулярная 	HYALUAL 2.2% Линейная 
ДЕФОРМАЦИОННО-ОТЁЧНЫЙ	HYALUAL 1.1% Лимфодренаж, папулярная 	HYALUAL 1.1% или HYALUAL 1.8% Лимфодренаж, папулярная 	HYALUAL 1.8% или HYALUAL 2.2% Линейная 
МЕЛКОМОРЩИНИСТЫЙ	HYALUAL 1.8% Папулярная, линейная 	HYALUAL 1.8% Папулярная, линейная 	HYALUAL 1.8% или HYALUAL 2.2% Линейная 
МУСКУЛЬНЫЙ	HYALUAL 1.1% Лимфодренаж, папулярная 	HYALUAL 1.8% Папулярная, линейная 	HYALUAL 2.2% Линейная 

Обозначение:  - Игла  - Канюля




Hyalual 1.1%

HA 11 mg/ml
SA 16 mg/ml

1/2 ml

Улучшение качества кожи без отечности даже пациентам с затрудненным лимфооттоком

- Лимфатическое осушение дермы, уменьшение отечного компонента
- Улучшение микроциркуляции
- Детоксикация тканей
- Осветление кожи на 1-2 тона
- Осветление кругов под глазами
- Устранение признаков усталости

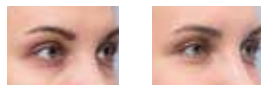

Полина, 28 лет
Показания: темные круги под глазами
Процедура: Редермализация периорбитальной области препаратом Hyalual 1.1%
3 процедуры с интервалом в 10 дней





Hyalual 1.8%

HA 18 mg/ml
SA 16 mg/ml

1/2 ml

Оптимальное соотношение для интенсивного увлажнения с минимальной нагрузкой на систему лимфооттока

- Восстановление водного баланса кожи
- Уплотнение дермы за счет восстановления коллагенового каркаса
- Уменьшение пигментации, осветление кожи
- Выравнивание микрорельефа кожи
- Уменьшение количества морщин
- Сияющий цвет лица

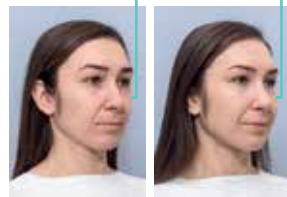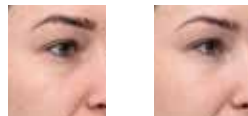

Юлия, 33 года
Показания: мимические морщины, снижение эластичности кожи
Процедура: Редермализация препаратом Hyalual 1.8%
3 процедуры с интервалом в 10 дней




Hyalual 2.2%

HA 22 mg/ml
SA 16 mg/ml

1/2 ml

Мощное, антиоксидантное действие, неоангиогенез, нормализация клеточного энергообмена

- Эффект лифтинга на кончике иглы
- Улучшение качества кожи за счет уплотнения дермы
- Уменьшение глубины морщин
- Восстановление цветности красной каймы губ
- Восстановление водного баланса в дерме

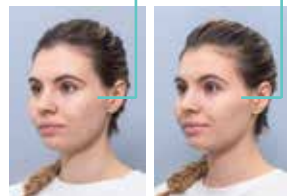

Екатерина, 25 лет
Показания: постакне
Процедура: Редермализация препаратом Hyalual 2.2%
3 процедуры с интервалом в 10 дней

*Результаты могут отличаться. Фото не обработаны, сделаны до и после курса процедур